



 surestep

// Produktkatalog

CAMP[®]
SCANDINAVIA

grow with us

THE SURESTEP STORY //

Surestep sine produkter har forbedret livskvaliteten for tusenvis av barn, men det startet med bare ett barn.

Ortopediingeniøren og grunnleggeren av Surestep, Bernie Veldman, hadde en bekymring; hvordan han skulle påvirke sin sønns pronasjon i føttene. Han så to muligheter; å nøye seg med hvordan det var, eller selv å skape noe bedre. Han valgte det siste alternativet. Etter å ha prøvd dusinvis av prototyper, ble endelig Surestep SMO født.

Helt siden den dagen har dette revolusjonert hvordan barn med hypotoni ortosebehandles. Surestep sin fokus i dag er å utvikle fotortoser for barn med lav tonus.



» Laget etter mål

» Unike "trim lines"

» Unik kompresjonsmetode

» Fleksibel termoplast

Smo & big shot

SMO // Suresteps dynamiske SMO benytter kompresjon for å stabilisere foten og ankelen, noe som muliggjør utvikling av intrinsikmuskulaturen, muskelstrategier og bevegelsesmønstre.

BIG SHOT // Designet med en innerhylse for aktive barn som fortsatt trenger stabiliteten hos en SMO. Utskjæringer skaper plass for prominente strukturer.

VEKTBEGRENSNINGER

SMO: Opp til 36 kg
Big Shot Lite: 22 - 40 kg
Big Shot: Over 36 kg

Individuelt laget etter mål.
Både gips og mål er nødvendig når mål nr. 5 på skjemaet overskrider 7,5 cm.

camp.no



Surestep SMO
28633/28634



Big Shot SMO
28636

modifications

Open Heel
Inner Boot
tillegg 28732



Toe Walking
Høyere bakkant
tillegg 28733



Clubfoot
Omvendte
trimlinjer og
abduert framfot
tillegg 28734



Metatarsus
Adductus
Omvendte
trimlinjer
tillegg 28735





INDIKASJONER

Pronasjon, hypotoni, instabilitet i tre plan ved vektbelastning, ingen evne til å stå selvstendig, mild tågange, framtrepende prominenser (kun Big Shot).



KONTRAINDIKASJONER

Hypertoni, spastisitet, kraftig tågange.



Toe Walking

Istedet for å blokkere plantarfleksjon, hjelper denne versjonen med å lette et "hæltil-tå" gangmønster ved hjelp av ortosens kompresjon, den høyere bakkanten og kinetisk påminnelse om å holde hælen nede.

Open Heel

Denne varianten forbedrer proprioepsjonen og anterior vektforflytting. For å unngå risiko for klyping har denne en ekstra tynn formet innerhylse.



Eget design!

Det finnes fler enn 30 ulike mønstre å velge mellom for å gjøre ortosen så tiltalende for barnet som mulig. Besøk vår hjemmeside regelmessig for å holde deg oppdatert med de nyeste mønstrene og fargene.

afo

Individuelt laget etter mål.
Både gips og mål er
nødvendig når mål nr. 5 på
skjemaet overskrider
7,5 cm.

camp.no

ADVANCED



28639

ADVANCED // Uleddet AFO med enkel overgang til en standard Surestep SMO.

EGENSKAPER

Fullengde fotblad, Surestep "trim line".

VEKTBEGRENSNING

Pasienter opp til 36 kg.

INDIKASJONER

Pronasjon, hypotoni, hypermobilitet, sent stående, ingen evne til å stå i lengre tid.

KONTRAINDIKASJONER

Alvorlig spastisitet, betydelige kontrakturer, betydelige fotdeformiteter.



indy 2



INDY 2 STAGE // Dynamic AFO/SMO som gir stabilitet i tre plan uten å begrense bruken av fotens muskulatur.

VEKTBEGRENSNING

Indy 2 Solid, ingen vektbegrensning
Indy 2 Articulated Small, opp til 18 kg
Indy 2 Articulated Large, opp til 36 kg

Individuelt laget etter mål.
Både gips og mål er nødvendig
når mål nr. 5 på skjemaet overskrider
7,5 cm.

variations indy 2

Solid Ankle
28631



Articulated
28260



INDIKASJONER

Hypotoni, hypertoni, fleksibel pronasjon eller supinasjon, nedsatt proprioepsjon, vanskeligheter med å forflytte seg fra sittende til stående, svakhet eller ustabilitet i sagittal og/eller frontalplanet, mild til middels spastisitet.



KONTRAINDIKASJONER

Betydelige ankelkontrakturer, alvorlig spastisk påvirkning.

HEKO 4-AXIS

HEKO



HEKO KNELEDD // Kneledd med 4-akser, perfekt for barn eller andre mindre ledd som håndledd, albuer etc. Det har lav vekt og liten bygghøyde. Full bevegelse eller innstilling mellom 0° - 135°.

VEKTBEGRENSNINGER

Small = Pasienter opp til 22 kg.

Large = Pasienter opp til 45 kg.



INDIKASJONER

Kneinstabilitet, overstrekking, varus-valgus kontroll.



KONTRAIKASJONER

Variierende ødem.



Eksempel på ortose med HEKO-ledd.

Art.nr.	Beskrivelse	Vekt	Bestillings- underlag	Enhet
28633 0000	Surestep SMO, Standard	Opp til 36 kg	Målbestilt	Par
28634 0000	Surestep SMO, Standard	Opp til 36 kg	Målbestilt	Stk.
28736 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Målbestilt	Par
28737 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Målbestilt	Stk.
28636 0000	Surestep Big Shot	Over 36 kg	Målbestilt	Par
28636 1000	Surestep Big Shot	Over 36 kg	Målbestilt	Stk.
28639 1000	Surestep Advance	Opp til 36 kg	Gips + Mål	Par
28639 0000	Surestep Advance	Opp til 36 kg	Gips + Mål	Stk.
28631 1000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	Ingen begrensning	Gips + Mål	Par
28631 0000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	Ingen begrensning	Gips + Mål	Stk.
28260 0011	Surestep Indy 2-Stage, Leddet	Opp til 18 kg	Gips + Mål	Par
28260 0013	Surestep Indy 2-Stage, Leddet	18 - 36 kg	Gips + Mål	Stk.
Tilleggsfunksjoner til over:				
28732 0000	Open Heel Moulded Inner Boot		Ikke for Advance	Stk.
28733 0000	Toe Walking Extension		Ikke for Advance	Stk.
28734 0000	Club Foot Trim Lines			Stk.
28735 0000	Metatarsus Adductus Trim Lines			Stk.
62650 0011	HEKO Kneledd, rustfritt	Opp til 22 kg		Par
62650 0013	HEKO Kneledd, rustfritt	Opp til 45 kg		Par

Surestep kan være den store forskjellen i barnets liv - med større selvsikkerhet og økt stabilitet for føttene sine med hjelp av våre ortoser!

*Bernie Veldman
CO, Grunnlegger av Surestep*

Support for Better Life!