



## Vennligst les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før du bruk VACOCast Diabetic.

**Formål:** Underbens- og fotortose designet for å avlaste trykket og immobilisere ledd i den angitte posisjonen. Du vil finne bruksanvisning på vår hjemmeside.

### Sikkerhetsinformasjon

- ⚠ Produktet er kun beregnet for bruk på en enkelt pasient.
- ⚠ VACOpedes er ikke designet for dynamiske påkjenninger som hopping og rask gange. Hvis du faller med VACOpedene montert, kontroller VACOpedene umiddelbart for skade. Hvis VACOCast skades, kan det påvirke sikkerheten din.
- ⚠ Bruk aldri produktet over åpne sår og bruk det kun som anvist av lege eller annet medisinsk personell.
- ⚠ Pasienten kan kun endre posisjonen til enheten etter samråd med lege som er ansvarlig for behandlingen.
- ⚠ Ta kontakt med din behandler dersom du opplever smerte, nummenhet eller endring i følelse.
- ⚠ Dette medisinske utstyret er utformet for de angitte indikasjonene og kan bli skadet ved utilsiktet eller feil bruk, for eksempel ved sport eller ulykker som fall, eller eksponering for væsker som er uforenlige med plastrmaterialer.
- ⚠ Ved bruk i kombinasjon med et annet medisinsk produkt, ta kontakt med legen din.
- ⚠ Kun reservedeler og/eller reservedeler godkjent av OPED GmbH skal brukes.
- ⚠ Vær oppmerksom på veitrafikkløven som gjelder i ditt land.
- ⚠ Ikke laget av naturgummilateks.
- ⚠ Sjekk at sålen sitter godt – ellers er det fare for å snuble!  
Såle: Når tåseksjonen er helt utvidet, kan gangen endres eller begrenses.
- ⚠ Fyllet i puten kan skli. Vi anbefaler derfor å åpne ventilen annenhver til tredje dag, jevnt ut eventuelle samlinger av små kuler og deretter gjenopprette vakuuemet.
- ⚠ Ventilklaffen skal alltid være lukket!  
Ventilringen må skyves ned og ventilklaffen lukkes (Figur 1 + 2).
- ⚠ Dette produktet er ment å brukes i maks. seks måneder.  
Når du bruker ortosen, sørg for at skoene er høye nok på motsatt side eller at sålen heves for å kompensere for høydeforskjell.

### Hvordan bruke

#### Montere VACOCast Diabetic

Trekk opp ventilringen (detaljer finnes i „Ventilfunksjoner“) for å la luften strømme inn (Figur 3). Hvis de små kulene i føret (Figur 4) har gruppert seg sammen, stryk dem glatt utover. Sett foten i tekstilføret (Figur 4) og posisjoner den med tekstilføret helt tilbake i det nedre skallet (Figur 5). Lukk deretter tekstilføret. Trekk føret litt opp (Figur 6). Monter det øvre skallet (Figur 7) og lukk stroppen for hånd (Figur 8). Når du monterer det øvre skallet, pass på at det ikke er knekk på ventilen. Det øvre skallet skal ikke plasseres mot eller over ventilen. Hvis legen tillater det, bare litt så foten legger seg inn i puten. Trekk deretter vakuuemet (detaljer under „Trekke vakuuemet“)

#### Justere og feste vakuumputen

Justerbar vakuumpute: Tekstiltrekket inneholder en pute fylt med små perler (Figur 9). For å hindre at kulene sklir inn i puten, suges luften ut via ventilen ved hjelp av sugepumpen, og skaper et vakuu (Figur 10). Puten tilpasser seg derfor perfekt til fotens anatomi og hevelse. Trykkfølsomme, sensitive områder og hevelser kan lindres ved målrettet omfordeling av kulene.

#### Ventilfunksjoner

##### Åpne ventilen / mykne opp vakuumputen:

Trekk opp ventilringen for å la luft strømme inn (Figur 3). Skyv så ventilringen ned igjen.

##### Lukk vakuuemet / herd vakuumputen:

Ventilen går ned. Fest sugepumpen og klem den til den ikke lenger blåses opp. Når pumpen klemmes, fjernes luft fra puten og det skapes et vakuu. Dette fester den tilpassede passformen på plass (Figur 11). Lukk til slutt ventilhetten (Figur 12).

##### Lukke ventilhetten

Skyv ventilringen ned og lukk ventilhetten. Da opprettes vakuuemet (Figur 12).

##### Bytte puteinnlegg

Det medfølgende erstatningsføret inneholder ingen pute. Ved bytte av før må puten fjernes fra det brukte føret og settes inn i det nye. Åpne den bakre glidelåsen helt og fjern puten fra det brukte føret. Plasser puten i det nye føret og skyv ventilen gjennom knapphullet (Figur 9).

Et ekstra tekstilfør er ikke inkludert i esken i alle land. Hvis den medfølgende pakken ikke inkluderer et ekstra tekstilfør, må denne bestilles separat.

##### Montere og bytte av såle

##### Fjerne sålen

Trykk på begge opplåsingsknappene samtidig (Figur 13).

##### Montere sålen

Plasser VACOCast Diabetic rett og sentrert på sålen før du skyver den mot sålen (klikkelyder) (Figur 14). Sjekk at sålen sitter godt fast.

##### Justere sålens lengde

Ta av sålen og trykk på opplåsingsknappen (Figur 15). Flytt tådelen til ønsket posisjon.

##### Justere leggomkretsen

Trykk spennen på begge sider ut av det nedre skallet (Figur 16). Skyv spennen til ønsket posisjon. Posisjon A = stor leggomkrets, Posisjon B = liten leggomkrets (Figur 17). Skyv spennen inn i det nødvendige hullet (Figur 18).

### Pasientinformasjon

#### Presspunkter / problemløsning

Fjern ortosen fra foten. Trekk i ventilringen for å la luft strømme inn i puten. Fordel fyllingen av puten jevnt ved trykkpunktet. Monter ortosen på nytt.

#### Dusj/vask

Du kan dusje med produktet hvis legen din har gitt deg tillatelse til det. Ortosen, spesielt dekelet, må beskyttes mot vann (f.eks. med dusjbeskytter) hvis du dusjer.

#### Save

Før du legger deg, legg et håndkle under enheten slik at sengetøy ikke skades.

### Produktgenskaper

#### Størrelser

Produktet kan brukes på venstre eller høyre side.  
Anbefaling: Der størrelsene går over mellom Small/Medium og Medium/Large, legg til den mindre størrelsen av VACOCasta Diabetic om mulig.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	39 – 43	43 – 49
UK	2 ½ – 5 ½	5 ½ – 8 ½	8 ½ – 13 ½
US (M)	3 ½ – 6 ½	6 ½ – 9 ½	9 ½ – 14 ½
US (F)	4 ½ – 7 ½	7 ½ – 10 ½	10 ½ – 15 ½

### Indikasjoner

- Sår på foten
- Diabetiske fotsår
- Postoperativ behandling etter amputasjoner av tå og forfot
- Diabetisk nevro-osteopropati (DNO AP) eller Charcot-fot

### Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

### Informasjon om stell/rengjøring/desinfeksjon/sterilisering

Du mottar dette medisinske produktet i hygienisk perfekt stand.

- Nedre skall: Oppvaskmaskin på 60° C.
- Stropp: Vaskemaskin på 40° C.
- Velourtrek: Vaskemaskin på 60° C, vask med lignende farger. Vennligst fjern vakuumpute for vask. Lukk glidelåsen og borrelåsen igjen.
- Tørke: Lufttørk, ikke bruk tørketrommel.
- Vakuumpute: Overflatedesinfeksjon.
- Sterilisere: Dette medisinske produktet er ikke egnet for sterilisering.

### Tilbehør

For å støtte behandlingen, kan følgende tilbehør, hvis det ikke er inkludert i pakken bestilles separat fra OPED GmbH.

- Stropplås (VERS-16-4-41): Stropplåsen kan brukes til å låse ortosen og sikre at den kan ikke fjernes. Den låses og låses opp ved hjelp av en spesiell nøkkel og kan derfor låses og låses opp gjentatte ganger.
- Låsenøkkel (VERS-11-3): Låsenøkkel kan brukes for å forhindre uønsket fjerning av ortosen.

### Materialspefisikasjoner

Harde nedre skall (PP); Før (bomull/PA velour/PU-skum); Putehylse (PVC); Fyllmateriale (EPS-sfærer); Stropp (PP-tekstil); såle (EVA); øvre skall (PP/PU). Alle deler og komponenter er lateksfrie.

### Transportbetingelser / lagringsforhold / avhending

Lagring: Oppbevares på et tørt og hygienisk sted og beskyttet mot direkte sollys.



Tyskland: Det medisinske utstyret er et leieprodukt og må returneres til OPED.

Sveits: Det medisinske utstyret kan returneres til OPED gratis.

Andre land: Vennligst kast det medisinske utstyret i restavfall eller husholdningsavfall.



### Garanti

Garantien gis i tråd med lovbestemte forskrifter. I tillegg til disse kommer vilkårene og betingelsene for virksomheten til OPED GmbH gjelder også, der det er tillatt.

### Datavern

Tyskland: Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger finner du her: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Sveits: Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger finner du under: <https://oped.de/datenschutz>.

Ved reklamasjoner knyttet til produktet, som skade eller problemer med passformen, vennligst kontakt produsenten direkte. Bare alvorlige hendelser som kan føre til en betydelig forverring av helse eller død, skal rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter i medlemsstaten. Alvorlige hendelser er definert i artikkel 2 (65) i Direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team