


Bruksanvisning

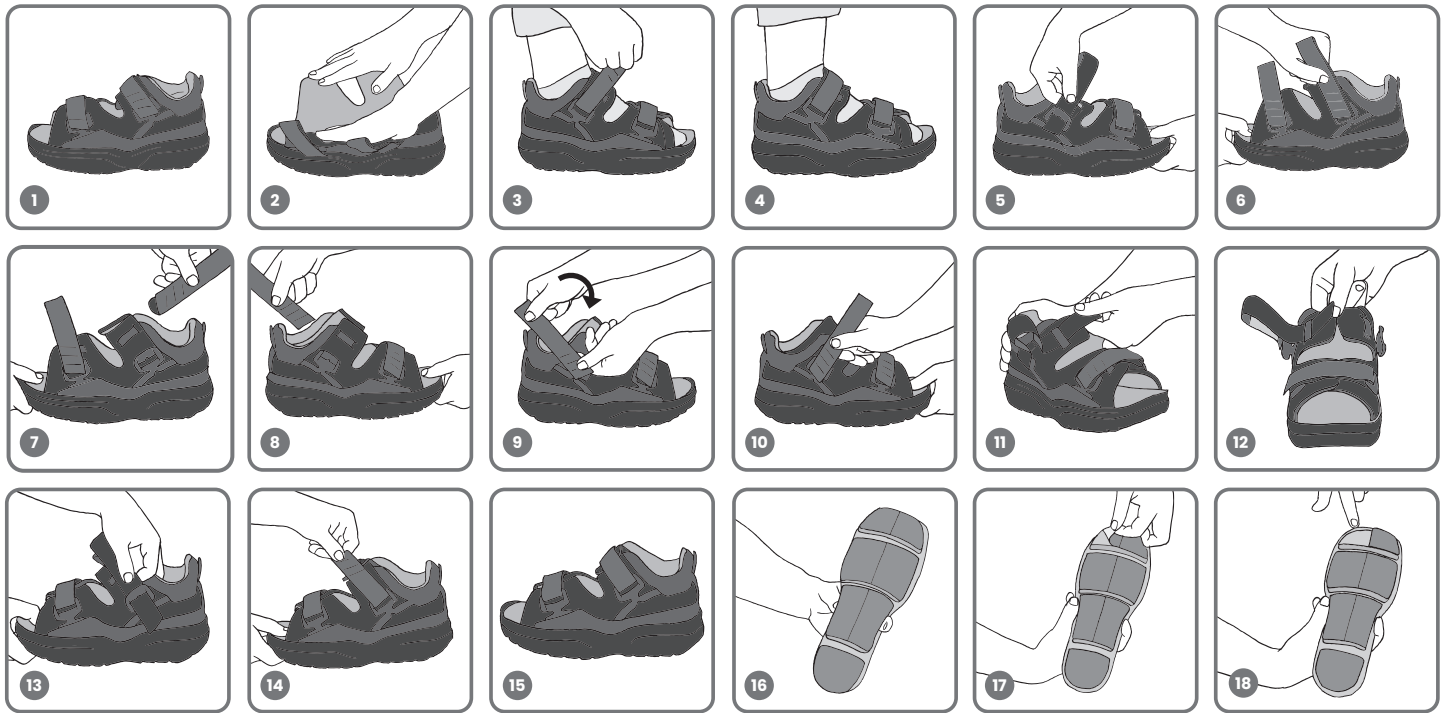

Vennligst les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før du bruk.

Tiltenkt formål: Bruksklare terapisko for å avlaste trykket på fotsår pga. diabetes.
Du finner bruksanvisninger på vår hjemmeside.

Sikkerhetsråd

- ⚠ Produktet er til éngangsbruk og skal kun brukes av én pasient.
- ⚠ Legg aldri produktet på åpne sår og bruk kun i henhold til anvisninger gitt tidligere.
- ⚠ Ta kontakt med din behandler dersom du opplever smerte, nummenhet eller endring i følelse.
- ⚠ Hvis huden blir rød eller du utvikler blemmer, eller hvis du opplever trykk eller gnisninger, kontakt legen din eller ortopedisk tekniker umiddelbart.
- ⚠ Dette medisinske utstyret er utformet for de angitte indikasjonene og kan bli skadet ved utilsiktet eller feil bruk, for eksempel ved sport eller ulykker som fall, eller eksponering for væsker som er uforenlige med plastmaterialer.
- ⚠ Rådfør deg med behandelende lege før du bruker produktet sammen med annen enhet.
- ⚠ Kun reservedeler godkjent av OPED GmbH skal brukes.
- ⚠ Vennligst følg veitransportloven i ditt land.
- ⚠ Ikke laget av naturgummilateks.
- ⚠ Vennligst sjekk funksjonaliteten til VACOpaso Free under vanlige sårkontroller. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt legen din eller din OPED-forhandler.

Slik brukes det (instruksjonsvideo finner du på www.camp.no)

- Åpne stroppen helt. Åpne skoen bredt nok til å kunne sette inn foten (Figur 2).
- Sett inn foten og fest stroppen (Figur 3).

Justering for høyre fot

VACOpaso Free kan brukes på begge føttene. Skoens standardinnstilling er for bruk på venstre fot.

Følgende instruksjon bidrar til å konvertere til høyre fot.

- Løsne på stroppen (Fig. 5)
- Vri stroppen 90° (Fig. 6)
- Ta av stroppen (Fig. 7)
- Fest stroppen på motsatt side av det som vises på bildet: (Fig. 8)
- Sett stroppklemmen inn i låsen (Fig. 9)
- Trykk ned stroppforseglingen og vri 90° til den klikker. (Fig. 10)
- Trekk stroppen gjennom den første løkken (Fig. 11)
- ADVARSEL: Ikke bruk løkke på motsatt side (Fig. 12)
- Tre stroppen gjennom hekten på motsatt side (Fig. 13)
- Lukk borrelåsfeste (Fig. 14)

Tilpass innleggssålen

- Pasienten kan kun justere den i samråd med behandelende lege.
- Skummaterialet under innersålen er delt inn i syv seksjoner som kan tas ut enkeltvis. Dette gjør at trykket kan avlastes på de aktuelle delene av foten. (Fig. 16)
- For å avlaste trykket på de områdene av foten som er berørt, fjern og kast de tilsvarende delene av skummaterialet fra sålen. (Fig. 17)
- Sett innleggssålen inn i VACOpaso Free igjen.

Informasjon om stell/rengjøring/desinfeksjon/sterilisering

Du mottar dette medisinske produktet i hygienisk perfekt stand. Sko og innleggssåle: Rengjør ved å tørke av med plastvennlige rengjøringsmidler.

Tørk: Lufttørk, ikke bruk tørketrommel.

Desinfisere: Tørk over med plastkompatibelt desinfeksjonsmiddel.

Sterilisere: Dette medisinske produktet er ikke egnet for sterilisering

Transportbetingelser / lagringsforhold / avhending

Oppbevaring: Oppbevares på et tørt og rent sted og beskyttes mot direkte sollys. Vennligst kast det medisinske utstyret i restavfall eller husholdningsavfall. 

Produktegenskaper

Kan brukes på høyre eller venstre fot. Kan brukes som hverdagssko både inne og ute. Størrelsestabell

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
EUR	37 – 38	39 – 40	41 – 42	43 – 44	45 – 46	47 – 48
UK	4 – 5	5,5 – 6,5	7 – 8	8,5 – 9,5	10 – 11,5	12 – 13,5
US men		6,5 – 7,5	8 – 9	9,5 – 10,5	11 – 12	12,5 – 13,5
US women	6 – 7	7,5 – 8,5	9 – 10	10,5 – 11,5		
cm	24,5	26	27	28	29,5	31

Indikasjoner

- Sår på foten
- Diabetiske fotsår
- Postoperativ behandling etter amputasjon av tå og forfot

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Materialspesifikasjon

Yttersåle (PU), innersåleplate (PA), stroppspenning (TPE), fôr (EVA-skum), trekk (elastan), borrelås (PA); putetrekk (PU-lag), fyllmateriale (PP-kuler), topplag (PE-skum)

Garanti

Garantien samsvarer med lovbestemte forskrifter. Vilkårene og betingelsene for virksomheten til OPED GmbH gjelder også, der det er tillatt.

Datavern

Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, finner du her:

<http://oped.de/support/your-data/>.

Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, finner du her:

<http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Ved reklamasjoner knyttet til produktet, som skade eller problemer med passformen, vennligst kontakt produsenten direkte. Bare alvorlige hendelser som kan føre til en betydelig forverring av helse eller død skal rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter i medlemsstaten. Alvorlige hendelser er definert i artikkel 2 (65) i Direktiv (EU) 2017/745 (MDR)

Ditt OPED-team