

S.W.A.S.H.® STEADY & GO STØRRELSESGUIDE

MIDJEDEL	Størrelse	Modeller		Omkrets
		STEADY	GO	Størrelsesintervall
<p>Mål: SWASH® STEADY- I nivå med midjen for god bolstabilitet. SWASH® GO- I nivå med ASIS. Det beste er å sette ortosen på mellomste delen av bekkenbeltet, for å få god hofte stabilitet.</p>	1	✓	✓	400-465mm
	2	✓	✓	460-550mm
	3	✓	✓	540-630mm
	4	✓	✓	620-720mm
	5	N/A	✓	710-810mm
	6	N/A	✓	800-900mm

LÅRDEL	Størrelse	Modeller		Omkrets
		STEADY	GO	Størrelsesintervall
<p>Ta sirkulært mål distalt på lårbenet. Plasser lårdelene så distalt så mulig uten å skape trykk eller påvirke knehasen. Men om det oppstår trykk på bolen, overdrevet fleksjon av ryggen eller ubehag av korte hamstrings, kan lårdelene flyttes 2-8 cm proksimalt.</p>	1	✓	✓	210-250mm
	2	✓	✓	250-290mm
	3	✓	✓	290-330mm
	4	✓	✓	330-380mm
	5	✓	✓	380-440mm
	6	✓	✓	440-500mm


BENSTAG	Størrelse	Diameter Benstag		Midje til Midt-patella
		STEADY	GO	
<p>Mål tas fra midjen til midt-patella. Etter avsluttet utprøving skal benstagene kortes av i nivå med lårdelene og gummiplugg settes på. 115° = smal sitteflate 123° = bredere sitteflate</p>	1	6mm	8mm	310mm
	2	8mm	8mm	375mm
	3	8mm	8mm	440mm
	4	8mm	8mm	480mm
	5	8mm	8mm	540mm
	6	8mm	8mm	600mm

Størrelse		MIDJEDEL STEADY	MIDJEDEL GO	LÅRDEL	BENSTAG 115°	BENSTAG 123°
1	STEADY	288520001		288540601	288550601	288560601
1	GO		288530001	288540801	288550801	288560801
2	STEADY & GO	288520002	288530002	288540802	288550802	288560802
3	STEADY & GO	288520003	288530003	288540803	288550803	288560803
4	STEADY & GO	288520004	288530004	288540804	288550804	288560804
5	STEADY & GO	N/A	288530005	288540805	288550805	288560805
6	STEADY & GO	N/A	288530006	288540806	288550806	288560806

Fargekodingen indikerer hvilke deler som kan kombineres.

S.W.A.S.H[®]

STEADY & GO STØRRELSESGUIDE

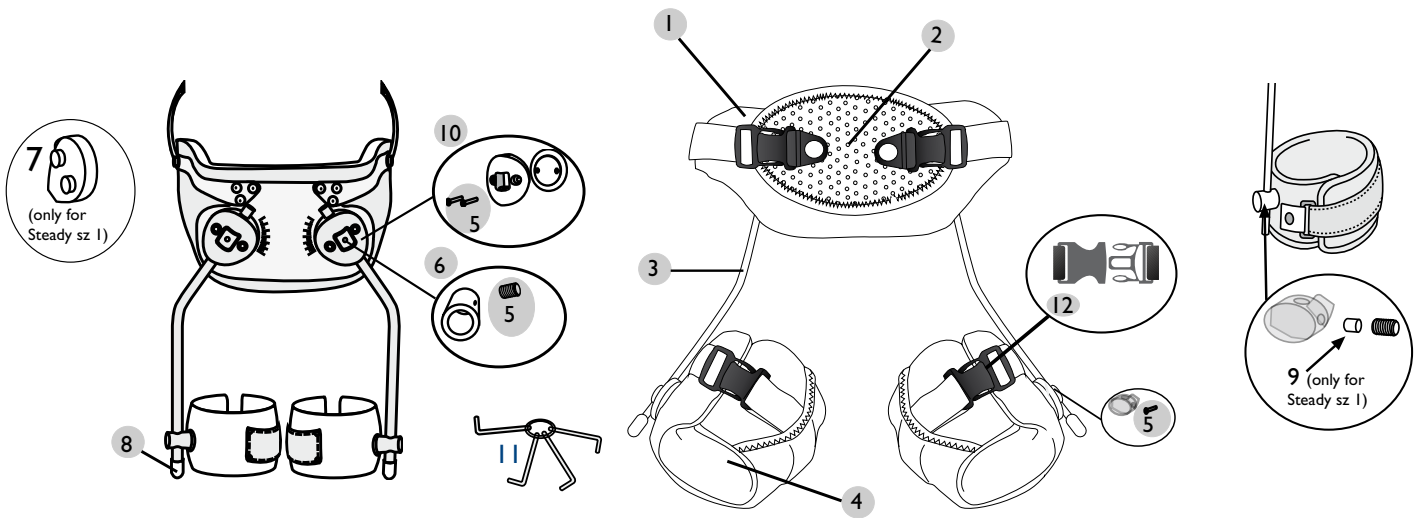

Nr.	Beskrivelse	Enhet	STEADY	GO
1	Tekstil midjedel inkl. mageplate	1 sett	28857	28858
2	Mageplate	1 stk.	28860	28860
3	Benstag 6 mm 15°, str. 1	Par	28855-06	
3	Benstag 8 mm 15°	Par	28855-08	28855-08
3	Benstag 6 mm 23°, str. 1	Par	28856-06	
3	Benstag 8 mm 23°	Par	28856-08	28856-08
4	Tekstil til lårdel	Par	28859	28859
5	Skruesett, str. 1		28861-06	
5	Skruesett, str. 2 - 6		28861-08	28861-08
6	Låsering, str. 1	2 stk.	28862-06	
6	Låsering, str. 2 - 6	2 stk.	28862-08	28862-08
7	Plasthette for ledd, str. 1	2 stk.	28863-06	
8	Gummiplugg for benstag, str. 1	2 stk.	28864-06	
8	Gummiplugg for benstag, str. 2 - 6	10 stk.	28864-08	28864-08
9	Messingforing, str. 1	10 stk.	28865	
10	Hofteleddssett, str. 1	2 stk.	28866-06	
10	Hofteleddssett, str. 2 - 6	2 stk.	28866-08	28867-08
11	Sekskantnøkkel	1 sett	28868	28868
12	Plastspenne 25 mm, str. 1 - 3	2 stk.	28869-25	28869-25
12	Plastspenne 38 mm, str. 4 - 6	2 stk.	28869-38	28869-38