

**CAMP**<sup>®</sup>

# Funksjonelle kneortoser ved artrose

i samarbeide med

 **VQ OrthoCare**<sup>®</sup>



**Support for Better Life!**


# Vårt sortiment av ortoser for Osteoartritt

Camp Scandinavia tilbyr i samarbeide med VQ OrthoCare en rekke unike kneortoser for behandling av artrose. Vårt brede sortiment gir et bra utvalg for løsninger tilpasset hver enkelt. Produktene har høy kvalitet med tanke på materialer og funksjon, og har egenskaper som forenkler både ved tilpassing og utprøving.



## Produktguide

Valget av kneortose ved behandling av artrose gjøres primært utifra graden av skaden og pasientens aktivitetsnivå. Andre faktorer som kan påvirke valget er pasientens opplevelse, legens ønske eller andre ligamentskader.

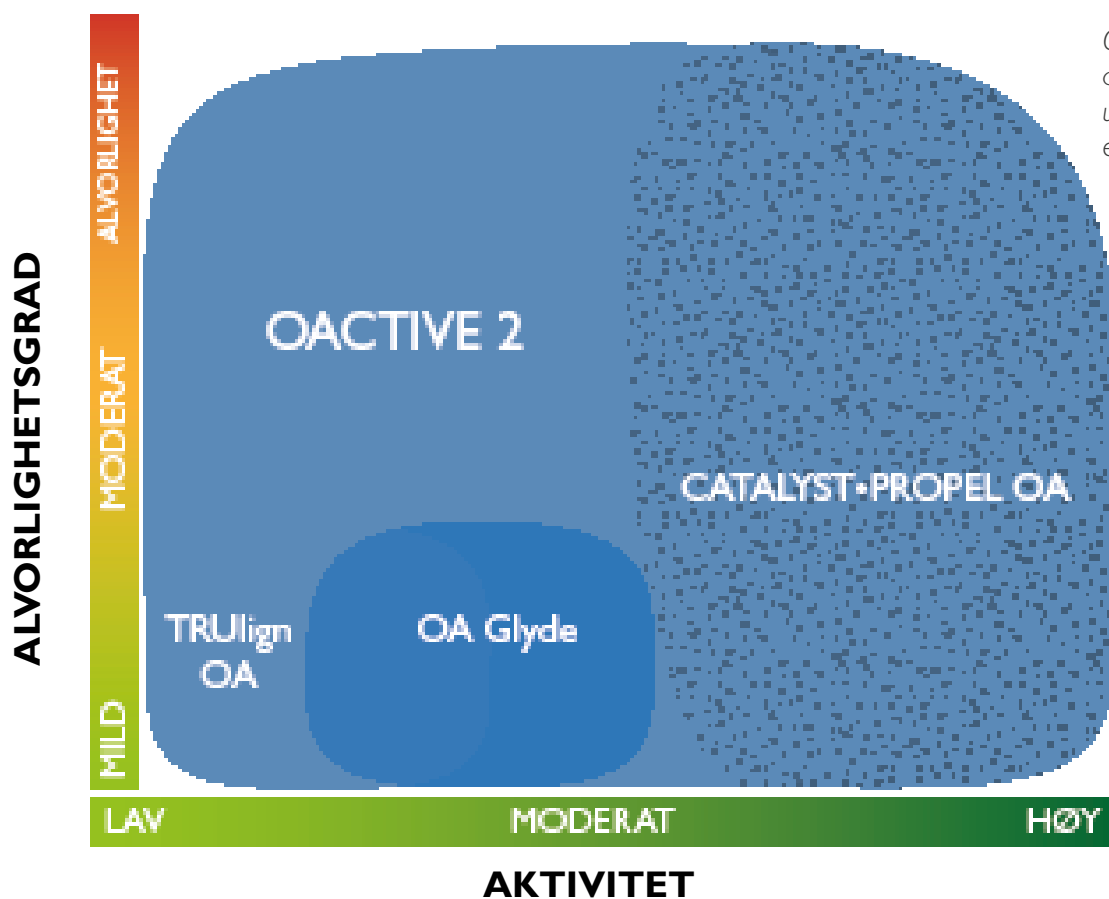


*OActive®2 passer de fleste pasienter uansett aktivitetsnivå eller grad av skade.*

# Q-ledd teknologien


Q-leddet forandrer den overgripende valgus/varus-vinkelen i ortosen for optimal korrigering. Dette gir muligheten til å finjustere korrigeringskreftene under utprøvingen basert på pasientens patologi og toleranse for en klinisk effekt som oppfyller kravene.




OACTIVE®2 FOR MEDIAL OA

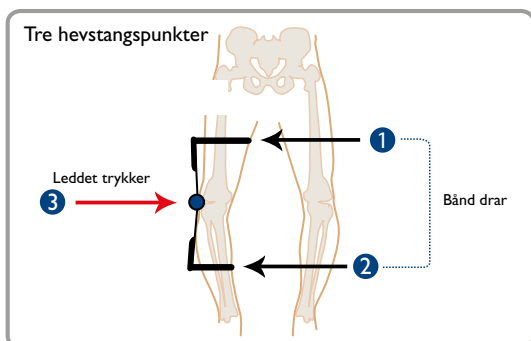


OACTIVE®2 FOR LATERAL OA

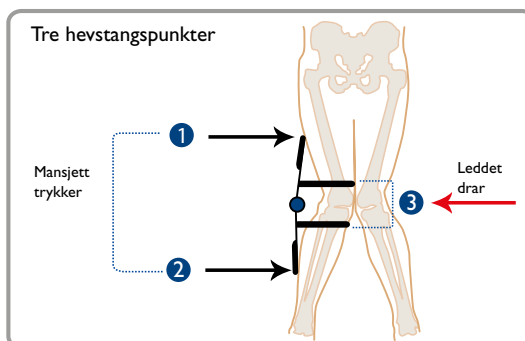


CATALYST PROPEL FOR MEDIAL OA

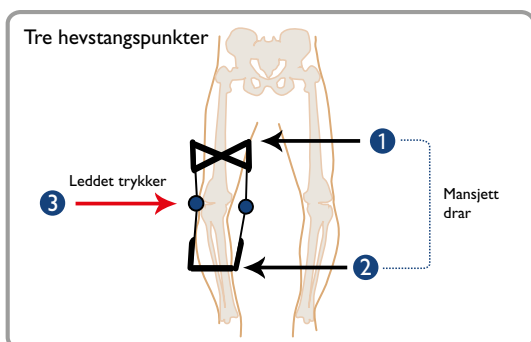


CATALYST PROPEL FOR LATERAL OA

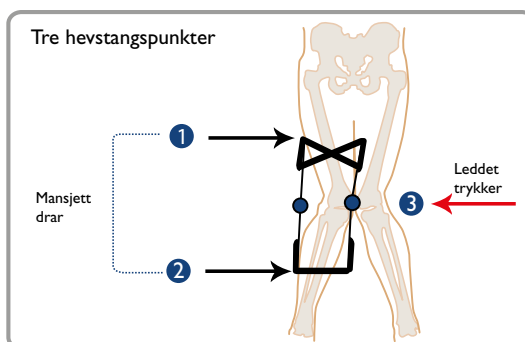

TRULIGN™ OA FOR MEDIAL OA

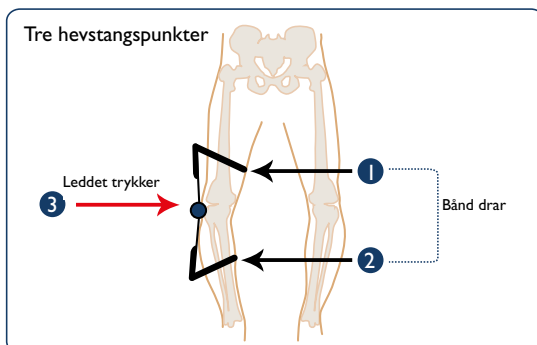

TRULIGN™ OA FOR LATERAL OA

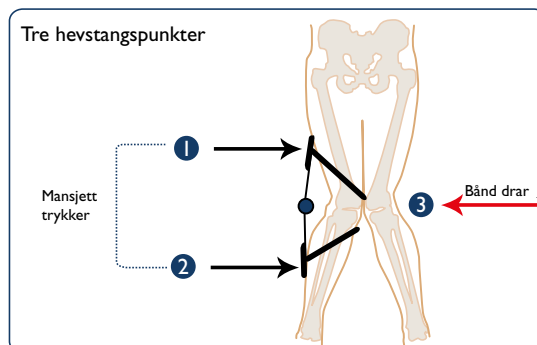



# OActive® 2

Unilateral kneortose for behandling av enkeltsidig kneartrose. Den har lett, smidig og enkel konstruksjon, og lav profil som gjør den mindre synlig under klær. Ortosen har smarte innovative spenner for å forenkle å ta på og av ortosen. Laget av aluminium.

Det unike Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. OActive® 2 kan også stilles inn for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert. Ortosen leveres med et brett med ulike stoppere for fleksjon og ekstensjon.

OActive® 2 finnes i en størrelse, venstre eller høyre.

## Suspension sleeve

Med hver OActive®2 leveres en Suspension sleeve som kan brukes på to måter:

1. Etter utprøving av ortosen kan sleeveen rulles over den nedre delen av ortosen for å hindre at den glir ned.
2. Etter utprøving kan sleeveen settes mellom benet og ortosen. Ta bort polstringen på den nedre delen av ortosen og trykk deretter fast ortosens borrelås mot sleeveen.

Alternativ 2 er den optimale løsningen for å hindre at ortosen glir nedover på benet.



Størrelsestabell - OActive® 2			
Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
OActive® 2	Grå	One Size	Venstre
OActive® 2	Grå	One Size	Høyre
Suspension sleeve	Grå	61 cm	-
Suspension sleeve	Grå	81 cm	-
Ekstra båndsett (uten spenner)	Grå	One Size	Venstre
Ekstra båndsett (uten spenner)	Grå	One Size	Høyre
Ekstra polstring	Grå	One Size	Venstre
Ekstra polstring	Grå	One Size	Høyre



# Catalyst Propel™ OA

Denne firepunkts kneortosen er beregnet for behandling av mild til alvorlig enkeltsidig kneartrose i kombinasjon med kneinstabilitet eller etter skade for å redusere belastningen mot leddet. Ortosen har den unike Active Thigh Cuff™ (ATC) løsningen på lårets framside. Dette er en fleksibel og sterk dobbel lårmanjett som muliggjør den ultimate plasseringen på benet. Gir beskyttelse og komfort ved å bevege seg med musklene igjennom hele bevegelsen. Sterk, men lavprofil aluminiumsramme av beste kvalitet gir en overlegen beskyttelse.

Ortosens Q-ledd justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90°, og vri 1/8 dels hverv om gangen for å justere avlastningen. Ortosen leveres med et brett med ulike stoppere for fleksjon og ekstensjon. Catalyst Propel™ OA kan også stilles inn for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.



## Dobbelt Q-ledd

Standardstørrelser gir unik justering av varus/valgus vinkel.

Størrelsestabell - Catalyst-Propel™ OA			
Størrelse	Omkrætsmål 15 cm under midt-patella	Omkrætsmål midt-patella	Omkrætsmål 15 cm over midt-patella
S	37 - 43	29 - 33	29 - 33
M	43 - 49	33 - 38	33 - 37
L	49 - 57	38 - 43	37 - 42
XL	57 - 65	43 - 48	42 - 47
XXL	65 - 76	48 - 56	47 - 56





# TRUign™ OA

TRUign OA™ er en unilateral kneortose for behandling av mild til moderat enkeltsidig kneartrose. Det er et enkeltsidig OActive™-ledd, designet for en brukervennlig "wrap around" ortose. Trykknapper bidrar til at ortosen er enkel å ta på seg.

Ortosen er anatomisk utformet, og materialet har høy stretch for god passform og kompresjon. Materialet er luftig og komfortabelt. Q-ledds teknologien tilfører brukeren god avlastning i henhold til 3-punkts prinsippet for å minske trykk og smerte ved kneartrose.

**Bruksområder:** Enkeltsidig medial eller lateral, mild til moderat kneartrose.



Størrelsestabell - TRUign™ OA		
Størrelse	Omkretsmål 15 cm over midt-patella	Omkretsmål 15 cm under midt-patella
S/M	36 - 47 cm	28 - 36 cm
M/L	47 - 65 cm	36 - 48 cm
L/XL	65 - 81 cm	48 - 64 cm



# Glyde OA™

Glyde OA er for deg med en aktiv livsstil, og er enkel å ta på med sin "wrap around" lukking.

Spiralbåndet gir en dynamisk avlastning for komfort og smertelindring. Det korrigerende leddet er dekket og ortosen lukkes enkelt med en trykknapp.

**Bruksområder** Enkelttidig medial eller lateral mild til moderat kneartrose.



Størrelsestabell - OA Glyde™		
Størrelse	Omkrømmål 15 cm over midt-patella	Omkrømmål 15 cm under midt-patella
Small	36 - 43	29 - 34
Medium	43 - 51	34 - 39
Large	51 - 61	39 - 46
X-Large	61 - 71	46 - 52
XX-Large	71 - 81	52 - 60



# Størrelsestabell

Art.nr. Venstre	Art.nr. Høyre	Modell	Størrelse	Farge
550001000	550002000	OActive 2 (maks. 135 kg)	En størrelse	Lysegrå
550011011	550012011	Catalyst-Propel OA, ATC	Small	Mørkegrå
550011012	550012012	Catalyst-Propel OA, ATC	Medium	Mørkegrå
550011013	550012013	Catalyst-Propel OA, ATC	Large	Mørkegrå
550011014	550012014	Catalyst-Propel OA, ATC	X-Large	Mørkegrå
550011015	550012015	Catalyst-Propel OA, ATC	XX-Large	Mørkegrå
550181011	550181011	TruLIGN OA	Small/Medium	Svart
550181012	550182012	TruLIGN OA	Medium/Large	Svart
550181013	550182013	TruLIGN OA	Large/X-Large	Svart
550241011	550242011	OA Glyde, medial	Small	Svart
550241012	550242012	OA Glyde, medial	Medium	Svart
550241013	550242013	OA Glyde, medial	Large	Svart
550241014	550242014	OA Glyde, medial	X-Large	Svart
550241015	550242015	OA Glyde, medial	XX-Large	Svart
550251011	550252011	OA Glyde, lateral	Small	Svart
550251012	550252012	OA Glyde, lateral	Medium	Svart
550251013	550252013	OA Glyde, lateral	Large	Svart
550251014	550252014	OA Glyde, lateral	X-Large	Svart
550251015	550252015	OA Glyde, lateral	XX-Large	Svart
550121000	550122000	OActive®2 Ekstra Båndsett (uten spenner)		
550131000	550132000	OActive®2 Ekstra Polstring		
550140061		Suspension Wrap	61 cm	
550140081		Suspension Wrap	81 cm	