



Kneortoser



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

CROSS™ semirigid kneortose for hyperekstensjon

CROSS™ er en semirigid kneortose beregnet til bruk ved overstrekking i kneleddet. CROSS er utviklet spesielt for å passe sammen med en ALLARD AFO (Ankel-Fot-Ortose/Droppfotsortose). Den har ingen bånd eller spenner som havner i konflikt med en ortose. Båndkrysset på baksiden stabiliserer overstrekkingen.

Den unike konstruksjonen gjør den enkel å ta på og av med bare en hånd. Ortosen har en ultramyk innside uten sømmer som gnager. Den myke innsiden gjør at ortosen glir lett mot huden og derfor er enkel å dra opp på benet. For å hindre migrasjon har ortosen strategisk plasserte silikonbånd på innsiden.

Den unike forsterkningen i overkanten gjør at CROSS™ alltid holder seg åpen, og ikke kollapser, noe som er en forutsetning for enkelt å kunne ta på ortosen med bare en hånd. Ta-på-hornet hjelper personer med nedsatt balanse og rekkevidde med å styre ortosen over foten og dra den opp på benet.

CROSS™-ortosen er bilateral og har ledd med innstilling for fleksjon og ekstensjon som følger med produktet. Bevegelsesintervallene i ROM leddet er fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90° og ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Bruksområder: CROSS™ er beregnet for mild til middels alvorlig hyperekstensjon i kneleddet på grunn av nevro-muskulære sykdommer eller andre skader. Ortosen kan brukes sammen med Allard AFO når hyperekstensjon i kneleddet forekommer i kombinasjon med droppfot.

Annet: CROSS™ kan vaskes i 40°. Med i forpakningen finnes også en tydelig grafisk instruksjon om hvordan man enklest tar på og av ortosen.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28715	CROSS™ kneortose	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715	CROSS™ kneortose	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715	CROSS™ kneortose	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715	CROSS™ kneortose	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716	CROSS™ T-Bøyle	En størrelse			
35710	Flexion/Extension Stop				

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella er en kneortose for bruk ved patellaproblemer. Den hesteskoformede puten kan enkelt tas ut og plasseres på den siden av patella der man behøver støtte. Puten har elastiske drabånd som fester seg til det myke velourmaterialet rundt kneskålen. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

Bruksområder: Patella luksasjon, patellafemoralt smertesyndrom, Schlatter, Jumpers Knee eller framre knesmerte.

Annet: Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35704	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilateral
35704	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilateral
35704	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilateral
35704	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilateral
35704	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Knee Minor

SELECTION® Minor er beregnet til bruk ved lettere smertetilstander i kneet. Minor gir lett kompresjon og har en varmende funksjon. De stabiliserende spiralfjærene på sidene gir en lett og behagelig støtte. Denne modellen er laget som en tube og gir dermed økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Lukkingen på lår og legg kan enkelt etterjusteres. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader eller overanstrengning.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35700	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilateral
35700	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilateral
35700	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilateral
35700	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilateral
35700	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilateral
35700	Svart	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Knee Minor Wrap

SELECTION® Minor er beregnet til bruk ved lettere smertetilstander i kneet. Minor gir lett kompresjon og har en varmende funksjon. De stabiliserende spiralfjærene på sidene gir en lett og behagelig støtte. Det åpne designet gjør ortosen enkel å ta på og av. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg kan enkelt etterjusteres. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader eller overanstrengning.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Dette produktet finnes i to lårvidder, se produktinformasjonen i tabellen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35701	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilateral
35701	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilateral
35701	Svart	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilateral
35701	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilateral
35701	Svart	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilateral
35701	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilateral
35701	Svart	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilateral
35701	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilateral
35701	Svart	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilateral
35701	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilateral
35701	Svart	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilateral

SELECTION® Knee Optima

SELECTION® Optima er beregnet til bruk ved en rekke ulike smertetilstander i kneleddet. Ortosens multifunksjoner gjør at den enkelt kan tilpasses ved utprøving. Optima leveres komplett med justerbare dobbeltleddede skinner og hyperekstensjonskryss på baksiden som enkelt kan monteres på og av. Ekstra bånd for å redusere at tibia faller framover i samband med ACL-problem. Denne modellen er laget som en tube, og gir dermed økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Ortosen har en anatomisk formet patellaåpning for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort. Optima har rigide bånd øverst og nederst, noe som gir økt stabilitet.

Bruksområder: Mild hyperekstensjon i kneleddet, mild/moderat M-L instabilitet, begynnende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artritt, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) eller ACL-skader.

Kontraindikasjoner: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor kneleddet utsettes for vold, og hvor det er stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Bevegelsesintervall i ROM leddet. Fleksjon: 45°, 60°, 75° og 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30° og 40°.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35702	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilateral
35702	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilateral
35702	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilateral
35702	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilateral
35702	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilateral
35702	Svart	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Knee Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap er beregnet til bruk ved en rekke ulike smertetilstander i kneleddet. Ortosens multifunksjoner gjør at den enkelt kan tilpasses ved utprøving. Optima leveres komplett med justerbare dobbeltleddede skinner og hyperekstensjonskryss på baksiden som enkelt kan monteres på og av. Ekstra bånd for å redusere at tibia faller framover i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomisk formet patellaåpning for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort. Optima har rigide bånd øverst og nederst, noe som gir økt stabilitet.

Bruksområder: Mild hyperekstensjon i kneleddet, mild/moderat M-L instabilitet, begynnende Artrrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artritt, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) eller ACL-skader.

Kontraindikasjoner: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor kneleddet utsettes for vold, og hvor det er stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon

Annet: Bevegelsesintervall i ROM leddet. Fleksjon: 45°, 60°, 75° og 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30° og 40°. Dette produktet finnes i to lårvidder, se produktinformasjon i tabellen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35703	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilateral
35703	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilateral
35703	Svart	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilateral
35703	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilateral
35703	Svart	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilateral
35703	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilateral
35703	Svart	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilateral
35703	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilateral
35703	Svart	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilateral
35703	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilateral
35703	Svart	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilateral

Active X™ Sleeve

Denne drapåmodellen er beregnet til bruk ved milde smertetilstander i kneet. Materialet i ortosen gir lett kompresjon og varme. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Rundt patellaåpningen ligger en myk polstring for økt patellastabilisering. Ortosen har borrelåsjustering på lårets framside og på leggens bakside. Active X Sleeve har en spiralskinne i hver side. Ortosen er bilateral.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse eller lett instabilitet i kneet.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som ACL/PCL-rupturer, alvorlige MCL/LCL skader. Vær oppmerksom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Ortosens lengde er 32 cm

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28056	Active X Sleeve	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056	Active X Sleeve	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056	Active X Sleeve	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056	Active X Sleeve	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056	Active X Sleeve	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056	Active X Sleeve	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056	Active X Sleeve	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Active X™ Sleeve PLUS

Denne drapåmodellen er beregnet til bruk ved lette smertetilstander i kneet. Materialet i ortosen gir en mild kompresjon og varme. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Rundt patellaåpningen ligger en myk polstring for økt patellastabilisering. Ortosen har borrelåjustering på lårets framside og på leggens bakside. Active X Sleeve PLUS har to spiralskinner i hver side samt to stabiliserende sirkulære bånd. PLUS er derfor litt mer stabil enn Active X Sleeve. Forøvrig har ortosene samme design og egenskaper. Ortosen er bilateral.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse, lett kneinstabilitet.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som ACL/PCL rupturer, alvorlige MCL/LCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Ortosens lengde er 32 cm

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Active X™ Double Axis

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har dobbeltleddede skinner og er stilt inn i 10° fleksjon. Materialet gir en lett kompresjon og varme. Avtagbare sirkulære bånd med D-ring (ett oppe og ett nede). Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Drapåmodellen har en myk polstring rundt patella for økt stabilisering. Ortosen er bilateral.

Bruksområder: Lett/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikasjoner: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Annet: Lengden på ortosen er 32 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28058	Drapå modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Drapå modell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Drapå modell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Drapå modell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Drapå modell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Drapå modell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Drapå modell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Drarundt modell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Drarundt modell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Drarundt modell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Drarundt modell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Drarundt modell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Drarundt modell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Active X™ short

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en lett kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Sirkulære bånd med D-ring (ett oppe og ett nede) som kan løsnes. Leveres med leddet stilt inn på 10° fleksjon. Sett med stoppere er inkludert. Ortosen er bilateral.

Bruksområder: Lett/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikasjoner: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Annet: Lengden på ortosen er 32 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28050	Drapå modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050	Drapå modell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28050	Drapå modell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050	Drapå modell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050	Drapå modell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050	Drapå modell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050	Drapå modell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051	Drarundt modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Drarundt modell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Drarundt modell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Drarundt modell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Drarundt modell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Drarundt modell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Drarundt modell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksjons-/Ekstensjonsstopp					

Active X™ long

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en lett kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Sirkulære bånd med D-ring (to oppe og to nede) som kan løsnes. Leveres med leddet stilt inn på 10° fleksjon. Sett med stoppere er inkludert. Ortosen er bilateral.

Bruksområder: MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader. Lett gonartrose. Bursitt. Leddlidelser.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL rupturer. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Annet: Lengden på ortosen er 40 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28052	Drapå modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28052	Drapå modell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28052	Drapå modell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052	Drapå modell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052	Drapå modell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052	Drapå modell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052	Drapå modell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28053	Drarundt modell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28053	Drarundt modell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28053	Drarundt modell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28053	Drarundt modell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28053	Drarundt modell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28053	Drarundt modell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksjons-/ Ekstensjonstopp					



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella



Mål: Omkretsmål midt-patella.

Active X™ Patella

Denne åpne modellen tenkt å stabilisere patella framfor alt i sideveis. Ortosen har en innbygget spesiallaget innleggspute som ved hjelp av sin konstruksjon legger seg stødig på siden av patella og "griper" tak og holder patella på plass. For en ekstra støtte har ortosen en uttakbar halvmåneformet plastskinne. Materialet er det innovative ventilerende Active X-materialet som er behagelig og føyelig.

Bruksområder: PFSS (Patellafemoralt Smerte Syndrom), Patella luksasjon, Patella Subluksasjon.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28055	Svart	XX-Small	24-29 cm	Bilateral
28055	Svart	X-Small	28-33 cm	Bilateral
28055	Svart	Small	32-37 cm	Bilateral
28055	Svart	Medium	36-41 cm	Bilateral
28055	Svart	Large	40-45 cm	Bilateral



Mål: Omkrets kne.

Airtex Patellar Tendon Band

Airtex Patellar Tendon Band (kneortose) gir støtte og kompresjon ved restitusjon etter akutt skade. Det gir dynamisk støtte til patellarsenen og er utformet med en anatomisk silikonpute for avlastning av senen. Båndet er laget med en kjerne av PVC for en forbedret knestabilitet.

Ortosen inngår i den nye AIRTEX-serien fra PRIM, og er utformet med en ny hudvennlig limingsteknikk som gjør det mulig å sammenføye de ulike tekstildelene uten sømmer. Fravær av tråd og sømmer minsker gnag på huden og øker komforten for brukeren. Airtex produktene er lette med 100% aktiv pusteevne.

Bruksområder: Osgood-Schlatters sykdom, kondromalacia patella, tendinitt i patellarsenen, sportsaktiviteter hvor kneet må strekkes ut.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28673	Svart	One Size	25-45 cm	Bilateral



Patellavator

Patellavator kneortose gir ved hjelp av kompresjon mot patellasenen lindring av smerte i kneet ved patella tendinitis. Ortosen er laget av et CoolFlex materiale som puster for optimal komfort ved daglig bruk og trening. Den vatterte kjernen gir et jevnt fokusert trykk over patellasenen for å redusere smerte og ømhet. For mer effektiv kompresjon har Patellavator en unik snøringsdesign som øker spenningen fra båndet. Dessuten en interlock lukking som er designet for å tåle aggressiv bruk uten å åpne seg eller ikke å påvirke motsatt ben under løping etc. Knebåndet er også designet slik at det ikke skal stase rundt benet eller irritere den myke delen i knehasen.

Bruksområder: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sykdom og Chondromalacia patella.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28674	Svart	Small	28-33 cm	Bilateral
28674	Svart	Medium	33-39 cm	Bilateral
28674	Svart	Large	39-44 cm	Bilateral
28674	Svart	X-Large	> 44 cm	Bilateral



Mål: Omkrets kne under patella.

PatellaCamp

Patella Camp er en kneortose beregnet til å gi stabilitet for patella. Ortosen er drarundtmodell og er åpen i knehasen. En innleggspute plasseres mot den siden av patella som er instabil, og de to elastiske båndene dras til ønsket mothold.

Bruksområder: Patella luksasjon, Patella sublaksasjon, Patellafemoralt smerte syndrom (PFPS).

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem når kompresjon kan påvirke sirkulasjonen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28679	Svart	Medium	<40 cm	Bilateral
28679	Svart	Large	>40 cm	Bilateral



Mål: Omkrets midt-patella



Mål: Omkrets midt-patella

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Drarundtmodell med kraftig ileggspute for stabilisering av patella. Patellastøtten kan appliseres lateralt eller medialt. Draget fra ileggsputen justeres lett med de to små båndene. Ortosen har integrerte støttebånd og er åpen i knehasen. Laget i et materiale som puster.

Bruksområder: Chondromalacia patella eller etter lukseret patella og subluksert patella.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28677	Svart	X-Small	25-30 cm	Bilateral
28677	Svart	Small	30-35 cm	Bilateral
28677	Svart	Medium	35-40 cm	Bilateral
28677	Svart	Large	40-45 cm	Bilateral
28677	Svart	X-Large	45-50 cm	Bilateral
28677	Svart	XX-Large	50-55 cm	Bilateral



Mål: Omkrets midt-patella

Gripper™ hinged knee

Drarundtmodell med patellaåpning og åpning i knehasen. Modellen har integrerte, rundtgående støttebånd med borrelås, samt metallskinner i forsterkede lommer. Enkel å ta på og av. Ortosen er laget av et materiale som puster. For å forhindre at ortosen sklir ned er det et antisklimmateriale montert på ortosens innside.

Bruksområder: Lett kneleddsinstabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28128	Svart	X-Small	25-30 cm	Bilateral
28128	Svart	Small	30-35 cm	Bilateral
28128	Svart	Medium	35-40 cm	Bilateral
28128	Svart	Large	40-45 cm	Bilateral
28128	Svart	X-Large	45-50 cm	Bilateral
28128	Svart	XX-Large	50-55 cm	Bilateral
28128	Svart	XXX-Large	>55 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm over midt-patella

Mål 2: Knemål 2 midt-patella.

KNE immobilizer

Immobiliseringsortose av polyestervelour med innebygde skinner for stabilisering. Ortosen er bygd opp av ulike paneler for enkelt å gi mulighet til å justere omkretsen. Borrelåslukning gjennom D-ringer. Åpning for patella. Finnes i voksen- og barnestørrelse.

Bruksområder: Postoperativ behandling, muskel- og ligamentskader, etter gipsing og til enklere ståtrening.

Art. nr.	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Lengde	Ve/Hø
28655	Barn	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilateral
28655	Voksen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilateral

Ascender® post-op kneortose

Ascender® er en teleskopisk (44 - 70 cm) postoperativ kneortose med innstilling mellom -10° (hyperekstensjon) og 70° . Fleksjonsbegrensning kan stilles inn mellom -10° og 120° . Innstillingen justeres enkelt ved å løfte og flytte stopperne i leddet. Leddet kan også låses i fem ulike posisjoner: -10° (hyperekstensjon), 0° (nøytral), 10° , 20° , 30° fleksjon. Leddet kan sikres ekstra ved å sette inn en "Anti-tamper" låsing ovenfor selve stopperen. Denne må klippes bort med saks om man senere ønsker å åpne innstillingen.

Hver skinne kan justeres til ønsket lengde individuelt. På hver skinne finnes en hekte som åpnes. Skinnen har tydelige markeringer for å forenkle at det blir samme lengde på den laterale og den mediale skinnen.

Den myke og føyelige polstringen har antigli materiale på innsiden. Båndene låses med ekstra låseklips for å holdes på plass under utprøvingen. Ortosen lukkes med kraftige spenner som hektes fast. Båndenes lengde kan enkelt justeres ved å løsne Y-festet og klippe båndet til ønsket lengde. Polstringen og båndene kan vaskes for hånd i lunkent vann med mild såpe. Universalmodell som passer både venstre og høyre. En størrelse.

Bruksområder: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde	Ve/Hø
47540	Ascender post-op kneortose	En størrelse	44 - 70 cm	Bilateral
47541	Komplett polstrings- og båndsett	En størrelse		Bilateral
47542	Ekstra polstringssett	En størrelse		Bilateral
47543	Ekstra båndsett	En størrelse		Bilateral



ROM postoperativkneortose

Postoperativ kneortose i universalstørrelse. Polstringen kan klippes til ønsket størrelse uten å frynse seg. Skinner av aluminium som kan formes for best mulig passform. Den komfortable og luftige polstringen holdes på plass av de sirkulære båndene. Det innkapslede polysentriske leddet er enkelt å justere. Leddet har pinner som holdes fast i leddet med små plastbånd for å hindre at pinnene faller ut. Leddet låses fast med en skrue for å hindre at det endres. Leddet kan stilles i ønsket grad av fleksjon (10° , 15° , 30° , 50° , 70° , 90° , 110°) og ekstensjon (5° , 10° , 15° , 30° , 50° , 70° , 90° , 110°). Modellen finnes i en kort og en lang versjon.

Bruksområder: Postoperativ eller posttraumatisk behandling for immobilisering av kneleddet for kontroll av fleksjon/ekstensjon.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Lengde
28308	Kneortose, kort	Mørkeblå	En størrelse	40 cm
28309	Kneortose, lang	Mørkeblå	En størrelse	60 cm
28311	Ekstra Båndsett 28308 kort	Mørkeblå	En størrelse	
28312	Ekstra Båndsett 28308 lang	Mørkeblå	En størrelse	
28313	Ekstra Polstring 28308 kort	Mørkeblå	En størrelse	
28314	Ekstra Polstring 28309 lang	Mørkeblå	En størrelse	





Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

Catalyst Propel™ OA

Denne firepunkts-kneortosen er beregnet for behandling av mild til alvorlig enkelsidig kneartrose i kombinasjon med kneinstabilitet eller etter skade for å redusere belastningen mot leddet. Ortosen har den unike Active Thigh Cuff™ (ATC) løsningen på lårets framside. Dette er en fleksibel og sterk dobbel lårmanjett som muliggjør den ultimate passformen. Gir beskyttelse og komfort ved å bevege seg med musklene gjennom hele bevegelsen. Sterk, men lavprofil aluminiumsramme av beste kvalitet gir en overlegen beskyttelse.

Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90°, og vri 1/8-dels verv om gangen for å justere avlastningen. Ortosen leveres med et kart med ulike stopp for fleksjon og ekstensjon. Catalyst Propel™ OA kan også innstilles for å begrense bevegelsesområdet for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Mild til alvorlig enkelsidig kneartrose i kombinasjon med kneinstabilitet. Etter skade for å redusere belastningen mot leddet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra båndsett	Small				
55010	Ekstra båndsett	Medium				
55010	Ekstra båndsett	Large				
55010	Ekstra båndsett	X-Large				
55010	Ekstra båndsett	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				

Glyde OA®

Glyde OA® er en enkel og effektiv unilateral kneortose for behandling av mild til middels enkeltsidig kneartrose. Et bånd med en enkel trykknappslukking sitter over leggen som gir et drag og trykkavlastning. DiamoCool™ stoffet som puster, gir en komfortabel kompresjon og skjuler ortosens trepunktsramme.

Bruksområder: Enkeltsidig medial eller lateral mild til middels kneartrose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Knemål 1	Knemål 2
55024	Medial	Small	Ve/Hø	36-43 cm	29-34 cm
55024	Medial	Medium	Ve/Hø	43-51 cm	34-39 cm
55024	Medial	Large	Ve/Hø	51-61 cm	39-46 cm
55024	Medial	X-Large	Ve/Hø	61-71 cm	46-52 cm
55024	Medial	XX-Large	Ve/Hø	71-81 cm	52-60 cm
55025	Lateral	Small	Ve/Hø	36-43 cm	29-34 cm
55025	Lateral	Medium	Ve/Hø	43-51 cm	34-39 cm
55025	Lateral	Large	Ve/Hø	51-61 cm	39-46 cm
55025	Lateral	X-Large	Ve/Hø	61-71 cm	46-52 cm
55025	Lateral	XX-Large	Ve/Hø	71-81 cm	52-60 cm
55026	Inner wrap	X-Large			
55026	Inner wrap	XX-Large			



Mål 1: Omkretsmål 15 cm over midt-patella.

Mål 2: Omkretsmål 15 cm nedenfor midt-patella.

TRUalign™ OA

TRUalign OA™ er en unilateral kneortose for behandling av mild til moderat enkeltsidig kneartrose. Det er et enkeltsidig OActive™-ledd, designet som en brukervennlig "wrap around" ortose. Enkel å ta på og av for brukeren. Ortosen er laget av et luftig og komfortabelt materiale.

Q-ledds teknologien gir brukeren god avlastning i henhold til 3-punkts prinsippet for å minske trykk og smerte ved kneartrose.

Fordeler

- Brukervennlige trykknapper
- Dynamisk stopping - fleksible korreksjonsmuligheter
- Skum med åpne celler - forbedret pusteevne
- Lateral ramme - Effektiv korreksjon for medial eller lateral OA
- Anatomisk formet - høy stretch i stoffet for passform og kompresjon

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Knemål 1	Knemål 2
55018	Small / Medium	Ve/Hø	36-47cm	28-36cm
55018	Medium / Large	Ve/Hø	47-65cm	36-48cm
55018	Large / X-large	Ve/Hø	65-81cm	48-64cm



Mål 1: Omkretsmål 15 cm over midt-patella.

Mål 2: Omkretsmål 15 cm nedenfor midt-patella.



OACTIVE® 2

Unilateral kneortose for behandling av enkelsidig kneartrose. Smidig og enkel konstruksjon med lav vekt. Laget av aluminium. Ortosen har smarte innovative spennere for å forenkle å ta på og av ortosen.

Det unike Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90°, og vri 1/8-dels verv om gangen for å justere avlastningen. OACTIVE® 2 kan også innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert. Ortosen leveres med et kart med ulike stopp for fleksjon og ekstensjon. OACTIVE® 2 finnes i en størrelse, venstre eller høyre.

Bruksområder: Mild til alvorlig enkelsidig kneartrose. Medialt eller lateralt.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Annet: OACTIVE® 2 har en vektbegrensning på maks. 135 kg

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
55000	OACTIVE 2	En størrelse	Ve/Hø
55012	Ekstra Båndsett (uten spennere)	En størrelse	Ve/Hø
55013	Ekstra Polstring	En størrelse	Ve/Hø
55014	Suspension Wrap	61 cm	
55014	Suspension Wrap	81 cm	

CHECK™ stainless steel

Bekvem kneortose beregnet for å motvirke hyperekstensjon og å støtte ved instabilitet i kneleddet. Ortosens lengde gjør at trykket mot femur og tibia blir mindre og ortosen blir mer bekvem i bruk. Den smidige konstruksjonen gjør at ortosen kan brukes under klær. Polstringen er laget av kunstlær. D-ringene som er inkludert kan settes på den siden av ortosen som passer pasienten best. Ortosen har kondyleputer.

Bruksområder: CHECK hensikt er å motvirke hyperekstensjon i kneleddet og å støtte instabilitet i kneleddet. Indikasjoner for bruk av CHECK er: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, nevrologiske skader/sykdommer som medfører svakhet i m.Quadriceps.

Kontraindikasjoner: Ikke beregnet for idrettsaktiviteter.

Art. nr.	Modell	Mål	Lengde	Ve/Hø
28651	Ekstra polstring			
28652	CHECK™ stainless steel	9-13 cm	45 cm	Bilateral
28653	Ekstra D-ringer			



Mål: Knebredde M-L midt-patella





Knemål 1: M-L midt-patella

Knemål 2: Omkrets 20 cm over patella

Knemål 3: M-L 20 cm over patella.

ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del spesielt laget for behandling av hyperekstensjon i kombinasjon med droppfot. Combo er en forlenging som monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unike konstruksjonen gjør at droppfotskinnen og Combo-delen enkelt kan kobles sammen. Combo kan/ skall ikke brukes sammen med YpsilonFLOW eller ToeOFF FLOW.

Bruksområder: Instabilitet i kneleddet, overstrekking i kombinasjon med droppfot pga. slag, post-polio, MS, nevropati etc.

Kontraindikasjoner: Totalt fravær av ligament i kneet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlengde over 2 meter. Pasientvekt over 150 kg. Kraftig svekket kognitiv evne.OBS: Når utprøvingen er ferdig kan det ikke være mer enn 10° hyperekstensjon igjen i ortosen.

Annet: For å bestille en COMBO kreves det 5 artikler i tillegg til ToeOFF/ BlueROCKER.

1. Kneledd med skinner (par)
2. Tibiakobling
3. Bånd, tekstil og spenner
4. Lårdel
5. SoftKIT (2 stk.)

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Knemål 1	Knemål 2	Knemål 3
28780	Kneledd med skinner (par)	En størrelse				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28782	Bånd, tekstil og spenner	Small	Bilateral	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spenner	Medium	Bilateral	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spenner	Large	Bilateral	12,5-16 cm		
28796	Leggbånd	En størrelse				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Small				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Medium				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Large				
28783	SoftKIT (2 stk.)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				

Hinged Swedish knee

En vel utprøvd modell i ny utførelse. Ramme av aluminium med lav vekt hvor et ledd er integrert for å tillate bøyning av kneet. Ny moderne polstring som gjør det enkelt å komme inn og ut av ortosen. Store justeringsmuligheter i omkrets. Antageligvis den mest benyttede løsningen ved hyperekstensjon i kneleddet. En universalstørrelse som passer både venstre og høyre side. Nå i en diskret grå farge.

Bruksområder: Hyperekstensjon i kneleddet.

Art. nr.	Modell	Mål	Ve/Hø
28667	Hinged Swedish Knee	28-54 cm	Bilateral
28671	Hinged Swedish Knee Strap Set	En størrelse	Bilateral
28672	Hinged Swedish Knee Liner Set	En størrelse	Bilateral



Mål: Omkrets 10 cm over midt-patella